

ProRhinel[®]

Hygiène du nez

À L'ALOE VERA

ProRhinel Hygiène du nez à l'Aloe Vera
Spray nasal

Solution isotonique naturelle d'eau de mer avec de l'extrait naturel d'Aloe Vera, ayant des propriétés nettoyantes, et apaisantes.

Spray doux avec de l'extrait d'aloé vera

Lisez attentivement cette notice avant d'utiliser ProRhinel Hygiène du nez à l'Aloe Vera. Si vous avez des questions, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien.

Le nez joue un rôle crucial dans le réchauffement et l'humidification de l'air respiré et dans la filtration des petites particules de l'air, ce qui protège les voies respiratoires basses de la poussière, de l'irritation, et de la sécheresse. Aussi, il est important de garder les fosses nasales propres et hydratées afin de permettre au nez de remplir pleinement ses fonctions.

1. QU'EST-CE QUE PRORHINEL HYGIÈNE DU NEZ À L'ALOE VERA, SPRAY NASAL ET DANS QUEL CAS L'UTILISER ?

ProRhinel Hygiène du nez à l'Aloe Vera est un spray nasal sans conservateur contenant une solution isotonique naturelle d'eau de mer. Ce produit contient aussi de l'extrait naturel d'Aloe Vera, qui est connu pour avoir des propriétés apaisantes et hydratantes.

ProRhinel Hygiène du nez à l'Aloe Vera est recommandé pour :

- Nettoyer les fosses nasales en douceur quand le nez est bouché, par exemple pendant un rhume ou en cas d'allergie, afin d'évacuer les mucosités en excès ou les particules allergènes telles que la poussière ou le pollen.
- Apaiser les voies nasales irritées.
- Hydrater la muqueuse nasale lorsque celle-ci est sèche ou irritée en cas d'irritations nasales mineures ou d'un faible taux d'humidité (par exemple : pièce chauffée ou avec de l'air climatisé, haute altitude, transport aérien).
- Diminuer la viscosité des sécrétions nasales, les décoller et aider à leur évacuation.

ProRhinel Hygiène du nez à l'Aloe Vera est aussi adapté au lavage nasal quotidien.

2. AVANT D'UTILISER PRORHINEL HYGIÈNE DU NEZ À L'ALOE VERA, SPRAY NASAL

Ne pas utiliser ce produit en cas d'allergie à l'un des composants.

Ne pas utiliser un spray nasal cassé ou endommagé.

Ne pas stériliser l'embout nasal au micro-ondes.

Pas de précautions particulières lorsque le produit est utilisé tel qu'il est recommandé. Cependant, vous devez consulter votre médecin avant l'utilisation de ProRhinel Hygiène du nez à l'Aloe Vera, spray nasal après une opération du nez ou une blessure.

En raison des propriétés de lavage de ProRhinel Hygiène du nez à l'Aloe Vera, quand il est utilisé en association avec un autre produit local par exemple pour le rhume ou la rhinite allergique, il est recommandé de l'utiliser avant l'autre produit nasal.

ProRhinel Hygiène du nez à l'Aloe Vera spray nasal peut être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement.

3. COMMENT UTILISER PRORHINEL HYGIÈNE DU NEZ À L'ALOE VERA, SPRAY NASAL

- ProRhinel Hygiène du nez à l'Aloe Vera **Jeunes Enfants** est spécialement adapté pour les jeunes enfants de plus de 2 ans jusqu'à 6 ans: la forme de son embout nasal est adapté au nez des enfants jusqu'à 6 ans. De plus, la pulvérisation fine de la solution permet un nettoyage en douceur du nez obstrué et du nez qui coule. Ce spray hydrate aussi la muqueuse nasale. Il est conseillé d'utiliser ProRhinel Hygiène du nez à l'Aloe Vera **Jeunes Enfants** sous la surveillance d'un adulte.
- ProRhinel Hygiène du nez à l'Aloe Vera **Enfants – Adultes** est adapté aux adultes et aux enfants à partir de 6 ans. Son embout nasal est adapté à la forme du nez des enfants à partir de 6 ans et des adultes. La pression du spray permet un lavage en douceur du nez obstrué et qui coule. Ce spray hydrate aussi la muqueuse nasale. Pour les

enfants en dessous de 11 ans, il est conseillé d'utiliser ProRhinel Hygiène du nez à l'Aloe Vera **Enfants – Adultes** sous la surveillance d'un adulte. Chez les personnes âgées ou handicapés, l'utilisation de ce dispositif peut nécessiter l'aide d'un adulte.

La fréquence habituelle est de **1 à 2 fois par jour par narine**. Si besoin, le produit peut être utilisé aussi souvent que nécessaire.

Pour des raisons hygiéniques et afin d'éviter une contamination, le spray nasal doit être utilisé par une seule personne.

1. Moucher le nez si besoin.
2. Retirer le capuchon protecteur du spray.
3. Si le spray n'a pas été utilisé depuis longtemps, amorcer le spray une fois dans l'air avant l'utilisation. Si l'embout du spray est bloqué, le nettoyer sous l'eau et le sécher correctement avec un mouchoir propre.
4. ** Pour les enfants qui ne peuvent utiliser le produit eux-mêmes :*
Allonger l'enfant sur son dos avec la tête inclinée sur le côté, pour que le liquide s'écoule plus facilement (**Fig.1**).
** Pour les enfants et adultes qui peuvent utiliser le produit eux-mêmes :*
Pencher la tête sur le côté, au-dessus d'une cuvette, inclinée sur un côté, afin que celle-ci soit la plus horizontale possible (**Fig.2**).
5. Insérer l'embout dans la narine supérieure et vaporiser brièvement (2 à 3 secondes).
6. Ensuite, incliner la tête de l'autre côté et répéter dans l'autre narine.
7. Laisser agir ce produit pendant quelques secondes. Ne pas se moucher pendant ce temps, mais essuyer le nez si nécessaire.
8. Puis, se moucher si nécessaire.
9. Après chaque utilisation, nettoyer et sécher l'embout et remettre le capuchon protecteur.



Fig 1



Fig 2

4. POUR VOTRE SÉCURITÉ

Dans des conditions normales d'utilisation, tel qu'indiqué, ProRhinel Hygiène du nez à l'Aloe Vera est très bien toléré.

ProRhinel Hygiène du nez à l'Aloe Vera Jeunes Enfants : l'embout est conçu pour les enfants afin de s'adapter à la forme naturelle des narines et une collerette de sécurité évite une insertion profonde et des blessures chez l'enfant.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce produit, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER PRORHINEL HYGIÈNE DU NEZ À L'ALOE VERA, SPRAY NASAL

Conserver le produit hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser le produit après la date de péremption indiquée sur l'emballage.

Ne pas conserver à une température supérieure à 25 °C.

Contenu sous pression : tenir à l'écart des rayons directs du soleil. Ne pas percer ou brûler même après utilisation.

Conserver dans son emballage d'origine.

Ne pas congeler.

6. AUTRES INFORMATIONS

Composants : extrait d'Aloe Vera, eau de mer et eau purifiée. Sans conservateur.

L'azote est ajouté en tant que gaz inerte propulseur dans ce dispositif pressurisé. Le gaz propulseur n'est pas en contact avec la solution.

Fabriqué par :

 Novartis Consumer Health S.A., Route de l'Etraz, CH-1260 Nyon, Suisse

Distribué par :

GLAXOSMITHKLINE SANTÉ GRAND PUBLIC

100, route de Versailles

CS 80001

78164 Marly-le-Roi Cedex

 0459

Date : Janvier 2016



NO 8175667-02
FR 936606 – ANA90NC24A