

ProRhinel[®] Spray

CE 0459
1999

Lire attentivement la notice avant d'utiliser ProRhinel[®] Spray.
Si vous avez des questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.

Lavage nasal en cas de Rhume et Rhinopharyngite

Spray nasal sous pression

1. Pourquoi est-il important de faire un bon lavage nasal ?

En cas de rhume ou de rhinopharyngite, la muqueuse nasale agressive par les virus réagit en développant une réaction inflammatoire qui aboutit à une augmentation des sécrétions nasales. Cela se manifeste par un nez bouché ou un nez qui coule.

La gêne occasionnée est d'autant plus importante chez le tout-petit que celui-ci ne sait pas, ou mal, respirer par la bouche ou se moucher.

Désobstruer les fosses nasales en cas de rhume et de rhinopharyngite est nécessaire pour aider à restaurer la respiration nasale.

2. Quelle est la composition de ProRhinel[®] Spray ?

Composition pour 100 ml de solution :

Bromure de benzododécinium, polysorbate 80, chlorure de sodium, alcool éthylique à 90°, glycérol, eau purifiée.

Ne pas utiliser en cas d'allergie à l'un des composants.

L'azote, gaz inerte est le gaz propulseur de ce spray. Il n'est pas en contact avec la solution.

3. Dans quels cas ProRhinel[®] Spray peut-il être utilisé ?

ProRhinel[®] Spray contient un fluidifiant; il peut être utilisé en cas de rhume et de rhinopharyngite.

Un lavage nasal avec ProRhinel[®] Spray :

- facilite l'évacuation des mucosités et des agents infectieux,
- diminue l'obstruction nasale,
- libère le nez pour une meilleure respiration.

ProRhinel[®] Spray Nourrissons-Jeunes Enfants et ProRhinel[®] Spray Enfants-Adultes sont également recommandés pour l'humidification des fosses nasales.

4. Quels sont les avantages de ProRhinel[®] Spray ?

- Le conditionnement en flacon pressurisé du ProRhinel[®] Spray permet de préserver la solution, rendant impossible l'entrée des mucosités à l'intérieur du flacon, le protégeant ainsi de toute contamination.
- ProRhinel[®] Spray peut être utilisé quelle que soit la position du flacon, pour une plus grande facilité d'emploi.

5. Quel ProRhinel[®] Spray choisir ?

ProRhinel[®] Spray Nourrissons-Jeunes Enfants est particulièrement adapté aux tout-petits :

Son embout nasal a une forme adaptée au nez des tout-petits jusqu'à 6 ans. En outre, la pulvérisation fine et non agressive de la solution permet un lavage tout en douceur. Ce spray peut aussi être utilisé pour l'humidification des fosses nasales.

ProRhinel[®] Spray Enfants-Adultes s'adresse aux adultes et aux enfants de plus de 6 ans.

Son embout nasal est adapté à la morphologie du nez des plus grands. Chez les enfants de moins de 11 ans, il est conseillé d'utiliser ProRhinel[®] Spray Enfants-Adultes sous la surveillance d'un adulte. Chez les personnes âgées ou handicapées, l'utilisation de ce spray peut nécessiter l'aide d'un adulte. Sa pression assure un lavage doux, respectueux de la muqueuse nasale. Ce spray peut aussi être utilisé pour l'humidification des fosses nasales.

ProRhinel[®] Spray Adultes Jet tonique est particulièrement adapté pour dégager les nez encombrés.

Son jet est 4 fois plus puissant que le jet de ProRhinel[®] Spray Enfants-Adultes.

ProRhinel[®] Spray Adultes jet tonique peut aussi être utilisé en cas de nez qui coule. ProRhinel[®] Spray Adultes Jet tonique n'est pas adapté pour l'humidification des voies nasales, contrairement au ProRhinel[®] Spray Enfants-Adultes.

Existe en flacon pressurisé de 100 mL.

6. Comment utiliser ProRhinel® Spray ?

Mode d'emploi:

ProRhinel® Spray peut être utilisé quelle que soit la position du spray.

• Pour un lavage nasal:

1 à 3 fois par jour en fonction de l'encombrement des fosses nasales.



Partie de l'embout nasal à entrer dans le nez.



Chez le nourrisson :



1. Allonger l'enfant sur un plan dur et tourner sa tête sur le côté.
2. Introduire délicatement l'extrémité de l'embout nasal dans la narine supérieure.
3. Exercer une pression franche sur l'embout pendant 2 ou 3 secondes.
4. Boucher la narine supérieure, le liquide doit s'écouler par l'autre narine.
5. Répéter l'opération sur l'autre narine après avoir changé la position de la tête (toujours laver la narine supérieure).
6. Essuyer doucement le nez de l'enfant avec un mouchoir doux. Pour les tout-petits, aspirer si besoin les sécrétions à l'aide de ProRhinel® Mouche-Bébé.



Chez l'enfant de plus de 6 ans et l'adulte :



1. Moucher préalablement le nez.
2. Bien incliner la tête sur le côté et introduire délicatement l'extrémité de l'embout nasal dans la narine supérieure.
3. Exercer une pression franche sur l'embout pendant 2 ou 3 secondes.
4. Boucher la narine supérieure, le liquide doit s'écouler par l'autre narine.
5. Répéter l'opération sur l'autre narine après avoir changé la position de la tête (toujours laver la narine supérieure).

• Pour une humidification des fosses nasales :

- 2 pulvérisations brèves dans chaque narine, 2 à 3 fois par jour.
- Ne pas se moucher violemment au cours des 10 minutes suivant la pulvérisation.

7. Quelles sont les précautions d'emploi ?

Par mesure d'hygiène, afin d'éviter toute contamination:

- Après chaque utilisation, nettoyer l'embout nasal sous l'eau chaude et le sécher avec un mouchoir propre.
- Ne pas utiliser de produits chimiques, liquide vaisselle ou de désinfectant. Ne pas utiliser de micro-ondes.
- Utiliser un spray par personne.
- Ne pas utiliser en même temps plusieurs produits à usage nasal contenant un antiseptique.

ProRhinel® Spray contient du bromure de benzododécinium, un ammonium quaternaire susceptible de provoquer une allergie locale chez les sujets sensibles à cette substance.

8. Comment conserver ProRhinel® Spray ?


Tenir hors de la vue et de la portée des enfants. Ne pas utiliser au-delà de la date limite inscrite sous le flacon. Ne pas conserver au réfrigérateur. Ne pas congeler.

Spray nasal sous pression : à protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Ne pas percer ou brûler, même après usage.

Ne pas utiliser si le produit est cassé ou endommagé.

Conserver le flacon dans son étui d'origine.

Si vous avez d'autres questions, adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien.

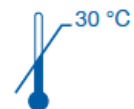

Ne pas conserver au-dessus de 30 °C



Novartis Consumer Health S.A. Route de l'Etraz, CH-1260 Nyon, Suisse.

Distributeur: GlaxoSmithKline Santé Grand Public, 23 rue François Jacob, 92500 Rueil-Malmaison



Pour plus d'information: www.prorhinel.fr

NO 43660348-04
FR 939116 - ANA90NC14E

Créé en décembre 2016